

MY-CHECK 中和抗体検査キット使用方法説明書

公式サイト: eco2020.cn

【血液での検査方法】

一般的に、血清、血漿、全血を含む血液。

【検査の方法】

1. アルミホイルバッグを開き、テストカードを取り出して机の上に水平に置きます。

2. 採血穿刺器で指先を刺し、軽く押さえて指先の血（血清/血漿/全血）をスポイトで採取し、テストカードの「S」塗布部位に一滴垂らし、次に、希釈液を「S」塗布部位に2滴垂らします。

3. 10分間待つてば結果を読み取ります。

動画説明⇒



【穿刺器の使用法等】

1) 穿刺前に穿刺部位(指先、手のひら等)をアルコール綿、お湯、石鹸水などで洗い清潔にし、消毒します。

2) 本品の保護キャップを持ち、メインボディを回転させてねじ切り、取り外します。この時、穿刺針はメインボディ内に格納されています。

3) 穿刺部位が乾燥している状態で穿刺部位に本品を押し付ける形で持ち、穿刺部位に押しあてます。

4) 穿刺ボタンを押すと作動し、穿刺針が出ます。作動するまで本品を穿刺部位に押しあてます。

5) 刺した部位を軽く掴み、血液を採取できます。

【判読基準】

	<p>IgM 陽性</p>	<p>最近新型コロナウイルスワクチンを接種し、血液検査で新型コロナウイルス中和抗体である IgM 抗体がありましたが、IgG 抗体はまだできていません。数日経つと IgG 抗体もでてきます。新規ワクチン接種者、抗体ありを意味します。</p>
	<p>IgM・IgG 陽性</p>	<p>IgG/IgM 抗体両方陽性の中期ワクチン接種者です。近期新型コロナウイルスワクチンを接種し、血液検査で抗体である IgG 抗体と IgM 抗体が出てきました。体にコロナウイルスに対して活発な免疫反応を進行中、抗体ありを意味します。</p>
	<p>IgG 陽性</p>	<p>後期接種者、以前新型コロナウイルスワクチンを接種したことがあります、血液の中に新型コロナウイルスの IgG 抗体がありますが、IgM 抗体が消えた後期接種者です。抗体ありを意味します。</p>
	<p>陰性</p>	<p>血液の中に新型コロナウイルスに対する IgG 抗体と IgM 抗体はありません。</p>
	<p>無効の例</p>	<p>検査キットが無効の提示です。取替えができますので、販売代理店にお問い合わせください。</p>

※検査結果の判読が分からない方は、テストカードを撮影して、当検査センターのメールアドレス：

redmoontrading1@yahoo.co.jp 宛てに送信してください。結果は後からメールにてご通知します。

※本製品は調査研究用であり、医薬品医療機器法に基づく体外診断用医薬品として承認・認証等を受けておりません。診断目的では使用できません。